

# Handleiding Aukey elektronische handloep

## Inhoud van de doos

- Aukey elektronische loep
- Adapter
- Polsbandje
- Standaard
- Handleiding
- Zakje

Plaats de loep voor u, met het display aan de bovenzijde, zodanig dat de tekst Aukey naar u toe staat en een aanduiding Aukey zich aan de linkerzijde bevindt.

De aan/uitschakelaar bevindt zich aan de achterzijde in het midden. Deze is te herkennen aan een puntje. Houdt deze minimaal 4 seconden ingedrukt om de elektronische loep aan te zetten, totdat het display wordt verlicht. Om deze weer uit te schakelen, druk deze dan 4 seconden in.

Als de loep aan staat, dan is de volledige kleurenfunctie ingeschakeld. Voor een optimaal beeld, houdt de Aukey ongeveer 2 tot 3 cm boven het leesoppervlak. Belangrijk: plaats de Aukey NIET op het papier!

Er zijn 2 digitale vergrotingsmogelijkheden nl. 1,5x en 17x. Gebruik hiervoor de toets aan de rechterzijde met 2 punten. Het is mogelijk om de vergroting enigszins te beïnvloeden door de afstand tot het leesoppervlak te wijzigen.

Het systeem heeft een 3-tal modi. Gebruik hiervoor de aan/uit/toets met een puntje. Deze toets dient maar kort ingedrukt te worden. Er zijn 3 kleurenmodi beschikbaar.

Druk deze toets in telkens als u deze indrukt wijzigt u de kleur:

1. Fotomode voor het bekijken van foto's
2. Leermode negatief  
De tekst is wit en de achtergrond zwart
3. Leesmode positief: de tekst is zwart en de achtergrond wit.

Het is ook mogelijk om het beeld te bevriezen. Daarmee heeft u de mogelijkheid het vastgezette beeld beter, bijvoorbeeld zeer dichtbij, te kunnen bekijken. In deze stand kunt u nog steeds de beeldscherm-kleuren wijzigen door op de toets te drukken met een puntje.

Gebruik de standaard/statief, indien een langere tijd achter elkaar gelezen dient te worden. Verwijder de standaard als u de loep meeneemt.

## Batterijindicator

De LED (lampje) geeft het volgende weer:

- rood, knipperende LED betekent dat de accu geladen dient te worden
- groen geeft aan dat de adapter aangesloten is en geladen wordt. Als de accu vol is, dan gaat de LED uit.

## Specificaties:

Vergroting	1,5 x – 17x
Vergrotingsmogelijkheid	2 niveaus
Scheruweergave	3 kleurenmodi
Vastzetten beeld	ja
Schrijfmogelijkheid	ja
Capaciteit accu	1500 mA
Werking accu	2,5 uur
Laadtijd accu	2,5 – 3 uur
LCD schermgrootte diagonaal	9 cm
Afmetingen	105 cm x 7,2 cm x 1,7 cm
Gewicht	120 gram
Adapter	5 Volt, 1,5A

## Bijzonderheden:

Ook bij normaal gebruik, opbergen en dragen is niet te voorkomen dat er kleine krasjes ontstaan op het TFT scherm en vallen niet onder garantie.

Zorg ervoor dat de loep niet wordt blootgesteld aan extreme koude of een warme temperatuur.

Plaats de Aukey niet bij een radiator of andere verwarmingsbronnen.

Vermijd het gebruik van agressieve vloeistoffen om de Aukey te reinigen.

Gebruik hiervoor een droge, zachte doek.

Gebruik alleen de bijgeleverde adapter.

Wij wensen u veel leesplezier met de Aukey elektronische loep.

