



slechtziend.nl

Handleiding Elektronisch loep Axiral

Inschakelen van de loep

Aan de onderzijde, midden, is een drukknop geplaatst. Hiermee zet u de elektronische loep aan. Klap voorzichtig de pootjes uit.

Plaats de loep voor u. De tekst van de loep is naar u toe gericht. De scharnierpunten van de loep zijn diverse functietoetsen.

Met de knop links boven, kunt u de vergrotingsfactor instellen, nl. 4 x of 8 x of 16 x. Telkens als u op een knop drukt, verschijnt er een andere vergroting.

Met de druktoets links onder kunt u de kleuren van het display wijzigen nl., zwart op wit of wit op zwart, geel op blauw, of blauw op geel.

Om het beeld te bevriezen druk de rechertoets boven in. Het beeld staat nu vast,, zodat deze bijvoorbeeld beter bekeken kan worden.

Tenslotte met de rechtersleutel aan de voorzijde kan het contrast ingesteld worden (deze kan niet gebruikt worden, als de unit aangesloten is op de TV).

Aansluiten op TV

Om de loep aan te sluiten aan een TV, verbindt de kabel van de TV en kies op de afstandsbediening van de TV voor AV mode (aux video mode). Het beeld verschijnt automatisch en geeft de vergrote tekst of afbeelding weer.

Accu -indicator

De accu-indicator (lampje) is:

- Groen en betekent dat de accu volledig geladen is
- Oranje bij minder dan 30% van de capaciteit
- Rood als de accu geladen dient te worden.

Het laden van de accu

U kunt de accu op elk gewenst laden m.b.v. de bijgeleverde adapter. De indicator geeft rood aan als deze geladen dient te worden en zodra deze groen wordt, is deze voor 100% geladen. Tijdens het laden kunt u de loep gewoon gebruiken.

Om de clip van het tasje te verwijderen, druk dan aan de bovenzijde hiervan en schuif deze er af. De knop kan er dan afgeschroefd worden.

Technische specificaties:

Afm.: 110 x 76 x 17 mm

Gewicht: 120 gram

Gebruiksduur accu: 2:45 uur

Korte afstand volledig HD digitale camera
Video TV output
Vergrotingsfactor 4x, 8x en 16x
Diagonaal Display: 112 mm
Accu: Li-Ion polymer
Wordt geleverd met tasje en lader.

Wees voorzichtig met het gebruik van de Axiral:
a. laat deze niet vallen
b. voorkom beschadigingen
c. voorkom krassen

slechtziend.nl
www.slechtziend.nl