

HANDLEIDING


Easyvox

Nederlandssprekend klokje



Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Easyvox, wij hopen dat u plezier en gemak heeft met dit hulpmiddel.

Als je het kastje van het klokje opent via de schroef aan de achterzijde, dan merk je inwendig een jumper op de bodemplaat, tegenover de opening van de schroef. Als deze jumper over beide pinnetjes geschoven zit, dan werkt het klokje op analoge wijze, ofwel easyvox werking. Zit de jumper op slechts één van beide pinnetjes, dan werkt het klokje op digitale wijze, ofwel tempovox werking genoemd.

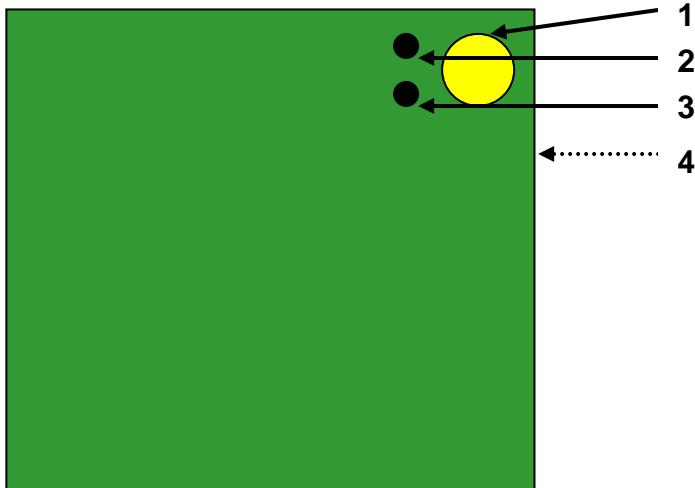

Wat is het verschil?

Als het klokje analoog werkt en je drukt de grote, gele tijdsschakelaar in (1), dan spreekt het hulpmiddel de tijd uit op analoge wijze. Bijvoorbeeld, 12.50 uur wordt uitgesproken als: 10 minuten voor 1 in de namiddag.

Als het klokje digitaal werkt en je drukt de grote, gele tijdschakelaar in (1), dan spreekt het hulpmiddel de tijd uit op digitale wijze. Bijvoorbeeld, 12.50 uur wordt uitgesproken als "12 uur, 50 minuten in de namiddag.

Dit geldt eveneens voor de tijds- en wekkerinstellingen. In beide gevallen wordt nadien de datum uitgesproken en de instelling van het actieve alarm, als je de grote, gele tijdsknop (1) ingedrukt houdt na de tijdsmelding.

Het volstaat om de analoge werking uit te leggen. De digitale werking verschilt slechts in de uitspraak van de ingestelde tijden.



Easyvox werking

Hiervoor moet de inwendige jumper over beide pinnetjes zitten.
Er zijn 3 bedieningsknoppen:

1. Tijdsknop

Deze knop is rechtstreeks te bedienen. U hoeft enkel kort de knop in te drukken en de tijd wordt uitgesproken. Houdt u de knop ingedrukt dan wordt tevens de dag en datum uitgesproken, gevolgd door de instelling van het alarm wanneer deze aanstaat.

De schakelaar heeft een tweede functie m.b.t. het instellingen menu, de werking hiervan volgt later in deze gebruiksaanwijzing

2. De plusknop

Deze knop wordt bediend via de opening naast de grote, gele tijdsknop (1), door een smal lang voorwerp bijvoorbeeld een uitgerekte paperclip, balpenvulling of tandenstoker in de opening te steken om de onderliggende drukknop te gebruiken. Wanneer u deze knop indrukt, hoort u een biep. Het klokje bevindt zich nu in de instelmode voor het alarm: “wekkerinstelling uren” wordt gezegd, gevolgd door de actuele instelling van de wekker. Bijvoorbeeld: 12 uur en 1 minuut op de middag. Door de pulsknop (1) telkens in te drukken, verhoogt de alarminstelling met 1 uur, het lijkt alsof je de grote wijzer van de klok met één vol uur verder draait.

3. De minknop (te gebruiken bij instellingen)

Door tijdens de instelmode de minknop in te drukken met een lang, smal voorwerp, verlaagt de alarminstelling met 1 uur/minuut. Het lijkt alsof je de grote wijzer van de klok met één vol uur terug draait. Blijf je continu op de plus- of minknop drukken dan wordt bij elke verhoging of verlaging van het alarmuur het nieuw ingestelde uur niet meer met spraak medegedeeld maar middels een biep. Laat u de knop los dan worden de huidige instellingen aangegeven.

Tijd en alarm instellen:

U pakt een paperclip of een ander lang, dun gebruiksvoorwerp en in het gaatje van de min knop (knop 3) gedurende 1,5 seconden in, U hoort nu 2 beepjes als bevestiging dat u in de instellingsmode zit. U laat nu de knop geheel los.

Nu kunt u de alarminstellingen wijzigen. Het klokje zegt nu: wekkerinstelling (bv. 15 uur, 1 minuut over de middag). Drukt u nu op de plusknop, dan wordt het alarm met 1 uur verhoogt, drukt u op de minknop dan wordt het alarm met 1 uur verlaagd. Wanneer het juiste uur is bereikt drukt u de grote, gele tijdsknop in om deze instelling te bevestigen. Ter bevestiging hoort u een biep en vervolgens hoort u: alarm minuten. Nu kunt u de minuten instellen. Ook hiervoor geldt dat wanneer u de tijdsknop indrukt de minuten omhoog gaan of met de minknop omlaag. Wanneer u de juiste minuten instelling hebt bereikt, bevestigt u dit weer met de grote, gele tijdsknop. Achtereenvolgens kan dan het weksignaal ingesteld worden. Er zijn 4 wekkertonen, namelijk: kakelgeluid, koekoekgeluid, biepgeluid en boinggeluid. Deze selecteert en bevestigt u middels het zojuist genoemde principe.

U bent nu door het alarminstellingen menu heen, waarna u automatisch en verplicht in het tijdsinstelling menu terecht komt. Eerst selecteert u de tijd in uren, de tijd in minuten, weekdag, datum, maand en jaarinstelling. (De jaarinstelling wordt weergegeven in 2 cijfers. Het jaar 2006 bijvoorbeeld wordt weergegeven als: 06.)

Wanneer u de laatste handeling in het instellingen menu heeft verricht, namelijk de jaarinstelling drukt u voor de laatste maal op de grote, gele tijdsknop ter bevestiging. Nu hoort u 2x een biep, wat betekent dat u uit het menu bent en de instellingen zijn opgeslagen.

Noot: wanneer u 45 seconden niets doet, zal het klokje automatisch het instellingenmenu verlaten.

Wekker activeren/deactiveren

Wanneer u de instellingen van de wekker heb ingegeven dient u deze enkel nog aan of uit te zetten. Wanneer u de minknop 1 keer drukt geeft het klokje aan: “wekker aan” of “wekker uit”. Door nog een keer kort op de minknop te drukken verandert u deze.

Uitzetten van het alarm

Wanneer het klokje een alarmtoon laat horen, kan deze worden uitgezet door één keer op de grote, gele tijdsknop te drukken. De uitschakeling wordt bevestigd met de uitspraak “uit”. Wanneer u het alarm niet zelf uitschakelt, stopt het alarm na enkele minuten.

Volume instellen

Met een kleine schroevendraaier kan via de opening (4) aan de zijkant het volume geregeld worden. De instelling verandert langzaam, zodat je nauwkeurig het gewenste geluidsniveau kunt bepalen. Je moet verschillende toeren draaien om een merkelijk geluidsverschil te verkrijgen.

Vervanging van de batterijen

Als de klok “prietpraat” vertelt, dan is deze toe aan nieuwe batterijen. Draai de schroef aan de achterzijde los en open het klokje. 2 AAA batterijtjes dienen te worden geplaatst met de juiste polariteit, zoals aangeduid in de batterijhouder. Het veertje is de minpool en moet contact maken met de vlakke van de batterijen. Wanneer u de batterijen binnen een halve minuut dan blijven alle instellingen gehanteerd. Doet u langer dan 30 seconden over het vervangen van de batterijen, dan dient u de instellingen opnieuw aan te passen.



Wanneer het klokje niet correct werkt

Verwijder de batterijen, druk een tiental seconden continu op de tijdsknop (1), plaats de nieuwe batterijen en sluit de deksel. Controleer of de Easyvox nu wel correct werkt. (het kan zijn dat de instellingen zijn gewijzigd!)

slechtziend.nl wenst u heel veel plezier en gemak met de Easyvox!

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit hulpmiddel verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:
slechtziend.nl