



slechtziend.nl

Handleiding Elektronisch loep Maggie

Naast de laadplug is de aan/uitschakelaar geplaatst. Naar links is aan, naar rechts is uit. Zie verder de afbeeldingen op de Engelstalige handleiding. Met de "playtoets" kan de unit aangezet worden.

Om met de Maggie te werken, handel als volgt:

1. Schuif de schakelaar naar links (is de "on" positie)
2. Druk daarna de play toets in en houdt deze enkele seconden vast
3. De elektronische loep gaat nu aan
4. Houdt de Maggie boven de tekst; zorg voor voldoende licht om een goed beeld te krijgen
5. Om de helderheid te regelen, gebruik de "brightness control". Dit is aan de voorkant van de 3 toetsen, de meest linkse toets; druk deze in om de helderheid lichter of donker te maken
6. De middelste van deze 3 toetsen is de kleureninsteltoets; druk deze in om te schakelen tussen kleur en zwart/wit
7. De insteltoets om de om de vergrotingsfactor te wijzigen is de de meest rechtse toets van deze 3. Druk achter elkaar om de vergroting te veranderen van 6x, 8x, 11x en terug naar 4 x.
8. Om het beeld vast te zetten om bijvoorbeeld de tekst goed te kunnen bekijken, druk dan op de "playtoets" aan de linkerzijde; druk nogmaals om de unit weer normaal te kunnen bedienen. Het vastgezette beeld wordt dus weer vrijgegeven.
9. De ingebouwde accu van de Maggie kan op 2 manieren worden opgeladen, nl via de USB kabel aan een computer of via de bijgeleverd adapter
10. slechtziend.nl wenst u veel leesplezier met de Maggie

Wees voorzichtig met het gebruik van de Maggie:

- a. laat deze niet vallen
- b. voorkom beschadigingen
- c. voorkom krassen

slechtziend.nl
www.slechtziend.nl