

ReadEasy+ voorleesapparaat

Basiskenmerken

- Beeldvastlegging d.m.v. camera
- OCR-module: Abby FineReader
- Automatische taaldetectie: ja



Aanvullende informatie

- Er zijn vier versies van ReadEasy: Basic, Pro, Zoom en Touch.
- De basis is een smalle en hoge behuizing met een schuin aflopende bovenkant. Op de bovenzijde bevinden zich zeven bedieningsknoppen en hier schuift de camera via een opklapbare arm in de basisunit. Dit is de Retina Basic.
- De ReadEasy bestaat uit de standaard basiseenheid, maar met een extra toetsenbordje. Het toetsenbord dient voor geavanceerde functies zoals bewaren, importeren (PDF, BMP, JPEG, PNG en TIFF), plaatsen van bookmarks, multipaginaverwerking (max. 20p/min.) en het exporteren van teksten als mp3 geluidsbestanden.
- De ReadEasy Zoom bestaat uit vier elementen: de basis, het toetsenbord, een muisbal en een breedbeeldscherm.
- Op het beeldscherm kan de tekst vergroot en in verschillende kleurencombinaties (max.64) getoond worden. De tekst kan naar keuze horizontaal of verticaal doorgeschoven worden. Hiervoor dient de muisbal bediening. Tegelijkertijd wordt de tekst ook voorgelezen.

- De ReadEasy Touch wordt geleverd met een aanraakscherm in plaats van een gewoon scherm. Door het scherm op de juiste plaats aan te raken, start de ReadEasy met voorlezen.
- Ook de tekst op ronde voorwerpen zoals blikjes kan gemakkelijk worden voorgelezen.
- De tekst wordt, vóór het toestel, onder de camera gelegd om vervolgens voorgelezen te worden. Het geluid kan via de ingebouwde stereo luidsprekers of via een hoofdtelefoon geregeld worden.
- Het apparaat wordt standaard geleverd met één taalpakket dat Nederlands en Engels bevat. Extra talen zijn mogelijk.
- Meegeleverde accessoires: hoofdtelefoon met volumeregeling en een hulpmiddel voor het verbeteren van het contrast onder de camera.
- Voeding: 110-240V.
- Afmetingen basiseenheid: 22 x 12 x 26 cm.
- Gewicht basiseenheid: 2,45 kg.



Uw slechtziend.nl verkooppunt:

Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:

slechtziend.nl

Tel: +31 (0)487-595654
Fax: +31 (0)487-595655

info@slechtziend.nl
www.slechtziend.nl