

# HANDLEIDING

## Milestone 310

*Nederlandsprekende memorecorder*



### 1. PRODUCT BESCHRIJVING

De belangrijkste punten van de Milestone 310 zijn:

- Beste in zijn soort qua geluid.
- Nieuw ontwikkelde microfoon en opname technologie waardoor je fluisterend en in een drukke zaal een bericht kunt opnemen.
- 2½ uur opname tijd
- Met 1 hand te bedienen
- Grote druktoetsen
- Oplaadbare batterijen, 1 keer opladen per week is voldoende
- Hoofdtelefoon aansluiting
- Halskoord

## **2. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT**

De Milestone 310 heeft 5 druktoetsen aan de voorkant. Die zijn gerangschikt in een vorm van een kruis. Houdt het apparaat zo vast dat het kruis van u af wijst, oftewel de gaatjes van de luidspreker en het halskoord naar u toe ligt.

De aansluiting voor de hoofdtelefoon bevindt zich rechts onderop. De aansluiting van de batterij oplader bevindt zich rechts bovenop. De kleine microfoon (tevens signaal-lampje) bevindt zich links boven op het apparaat.

De luidspreker zit op de onderkant van het apparaat, dat is te voelen door de gaatjes.

Op de achterkant bevindt zich een serienummer en gegevens van de fabrikant.


## **3. GEBRUIKSAANWIJZING**

De Milestone 310 is direct klaar voor gebruik. Houd de middelste toets ingedrukt.

De druktoetsen staan in een kruispatroon. De kleine toets aan de bovenkant is de opnametoets. De druktoets in het midden is iets groter en heeft geen symbool dit is de afspeeltoets.

De X toets (mode) is voor speciale functies. Links en rechts van de middelste toets zijn de pijltjestoetsen. Deze toetsen kun je gebruiken om voor- en achteruit te spoelen.

### **3.1. OPNEMEN VAN BERICHTEN**




Om een bericht op te nemen druk dan de bovenste smalle toets en houd die ingedrukt terwijl u opneemt. Spreek met een normaal volume en houd het apparaat ongeveer 10 cm van uw mond vandaan voor het beste resultaat. Voor continu opname kun je eerst de smalle toets indrukken en kort daarna de middelste toets. Om de opname te stoppen moet u even de opname toets kort indrukken.

### **3.2. AFSPLEN VAN BERICHTEN**



Om berichten af te spelen druk de afspeel toets in, om het afspelen te stoppen druk dezelfde toets in.

De afspeeltoets dient ook als pauze toets. Je kunt hiermee pauzeren en verder afspelen van het bericht als u het einde van het bericht nadert dan zal het apparaat automatisch stoppen met afspelen. Drukt u dan opnieuw de middelste toets in dan gaat hij het bericht weer opnieuw afspelen.



Als je het bericht van voor af aan wilt afspelen terwijl hij al begonnen is druk dan op de linker pijltjes toets.

### **3.3. BERICHTEN VERWIJDEREN**

Speel het bericht wat je wilt verwijderen af. Terwijl het bericht afgespeeld wordt of kort nadat het gestopt is druk en houd de X toets ingedrukt en druk kort op de afspeel toets in het midden. Een kort piepgeluid zal klinken als een bevestiging.

Een bericht kan verwijderd worden terwijl het afgespeeld wordt of na 15 seconden als het afspelen is gestopt. Voor de veiligheid is er geen mogelijkheid om alle berichten tegelijk te verwijderen.

### **3.4. TERUGSPELEN VAN VORIGE OF VOLGENDE BERICHT**

Je kunt naar het vorige bericht gaan door op de linker pijltoets te drukken en als je naar het volgende bericht wilt druk je de rechter pijltoets in. Het bericht zal automatisch worden afgespeeld na de verspringing. Je kunt het bericht ieder moment stoppen door op de afspeeltoets te drukken.

Als u probeert naar een volgende bericht te gaan terwijl die er niet is zult u een piepgeluid horen.

### **3.5. SPRING NAAR HET EERSTE OF LAATSTE BERICHT**

Om naar het eerste opgenomen bericht te gaan druk en houd dan de linker pijltoets vast en druk afspeeltoets in en het eerste bericht zal afgespeeld worden. Het laatste bericht kunt u op dezelfde wijze terug vinden door op de rechter pijltoets vast en de afspeeltoets in-gedrukt te houden.

### **3.6. GELUID INSTELLEN**

Houd de X toets ingedrukt en druk op de rechter pijltoets om het geluid harder te zetten. Om het geluid zachter te zetten druk dan op de linker pijltoets. Met iedere druk op de toets verandert het geluid per niveau. In totaal zijn er 12 geluidsniveaus. Bij het bereiken van de maximale of minimale geluidsterkte hoort u een piepsignaal.

In plaats van de pijltjestoets steeds opnieuw in te drukken kunt u hem ook vasthouden. Na ongeveer een seconde zal het geluid veranderen naar de gekozen sterkte.

### **3.7. DE TOETSEN BLOKKEREN**

Door de X toets en de opname toets samen in te drukken kunt u de toetsen blokkeren. Als u dit gedaan heeft hoort u ter bevestiging 2 piepsignalen. Om de toetsen te deblokkeren druk dan dezelfde combinatie nog een keer in u hoort ter bevestiging 1 piepsignaal. Waarschuwing: Om energie te besparen zal het apparaat zichzelf uitschakelen als u hem een paar minuten niet gebruikt heeft. Het apparaat wordt weer geactiveerd wanneer u een van de toetsen voor een halve seconde indrukt.

Daarom moet u ook zeker de X toets voor 1 seconde ingedrukt houden voordat u de opnametoets indrukt. Op deze manier zal het apparaat ontwaken en zal hij de opdracht om te deblokkeren uitvoeren.

### **3.8. NAVIGEREN IN EEN LANG BERICHT**

Om snel te navigeren in een lang bericht houd dan de linker- of rechterpijltoets ingedrukt. Als u de toets los laat zal het bericht in de normale snelheid afgespeeld worden.

### **3.9. CONTROLE STATUS BATTERIJ**

Om de status van de batterij te controleren druk je 2 keer snel achter elkaar op de X toets. Daarop volgend zult u 1 of meerdere lage piepjes horen met een flitsend rood signaallampje.

- 1 enkele piep batterij vol of bijna volle
- 2 piepjes batterij voor meer dan 40% vol
- 3 piepjes batterij voor minder dan 40% vol u zult hem dan moeten opladen.
- 4 piepjes batterij is bijna leeg onder deze omstandigheid kunt u geen berichten meer opnemen. De van tevoren opgenomen berichten blijven bewaard.

### **3.10. OPLADEN VAN DE BATTERIJ**

De ingebouwde batterij is oplaadbaar en als je de adapter aansluit in het gaatje rechts bovenop kun je hem opladen. Als de batterij wordt opgeladen hoort u na een paar seconde een lange lage piep. Tijdens het opladen flitst het rode lampje iedere 5 seconde.

Als je de lage piep niet gehoord hebt dan kan het zijn dat de oplader niet goed is aangesloten of dat de batterij al vol is. Je kunt dit makkelijk nagaan door 2 keer op de X toets te drukken.

Als de batterij vol is zal het apparaat 2 lange lage piepjes geven. Het signaal lampje zal ophouden met flitsen. Dit zal ook gebeuren als de oplader verwijderd wordt als de batterij bijna is opgeladen.

De batterij van de Milestone 310 hoeft niet perse helemaal leeg te zijn om hem op te laden doordat er voortaan een moderne lithium-polymeer batterij in zit kun je het apparaat zo vaak je wilt opladen. Als de batterij helemaal leeg is duurt het niet meer dan 3 uur voordat de batterij opgeladen is. Je hoeft niet perse de adapter eraf te halen, want als de batterij is opgeladen zal de stroomtoevoer automatisch stoppen.

### **3.11. SLAAPSTAND**

Als het apparaat 5 minuten niet wordt gebruikt schakelt het zich zelf uit. Het apparaat zal weer ingeschakeld worden door een van de toetsen minstens een halve seconde ingedrukt te houden.

De opname vanuit de slaapstand zal met een vertraging van een halve seconde gestart worden. Verdere opnames zullen direct worden opgenomen zodra de opnametoets ingedrukt wordt.

### **3.12. BETEKENIS VAN DE PIEPGELUIDEN**

- 1 piep: informatie,
- 2 piepjes: waarschuwingssignaal,
- 3 piepjes: waarschuwing voor een probleem.

Hoge pieptonen horen bij de opgenomen berichten lage pieptonen horen bij het opladen van de batterij.

## **4. VOORBEELDEN VAN TYPISCHE FUNCTIES**

Op dit punt willen wij wat voorbeelden beschrijven die de bediening vergemakkelijken. Deze kun je gebruiken om de bediening van de Milestone 310 te vergemakkelijken.

Start van een opname: druk op de bovenste kleine toets en houd die ingedrukt terwijl u het bericht inspreekt.

**Afspelen van het bericht:** druk kort op de toets in het midden (zonder reliëf).

**Bericht verwijderen:** druk kort op de afspeeltoets in het midden. Tijdens het afspelen van het bericht druk op de X toets en houd die ingedrukt en druk kort op de afspeeltoets in het midden. Het bericht zal nu verwijderd worden. Een korte piep geeft aan dat het bericht verwijderd is.

**Een bericht opnemen tussen 2 bestaande berichten:** neem een aantal aparte berichten op. Terwijl je een bericht afspeelt kun je naar het volgende bericht springen met behulp van de pijltjes-toetsen.

Door op het eerste bericht te gaan staan komt het nieuwe in-gesproken bericht tussen de eerste en tweede in te staan. In tegenstelling tot een cassette recorder zullen de bestaande berichten apart verplaatst worden en wordt er ruimte vrij gemaakt voor het nieuwe bericht.

Dit maakt het makkelijker om een opeenvolging van berichten te maken. Door de afspeeltoets + pijl naar links of rechts in te drukken gaat u meteen naar het begin of einde van alle berichten.

**Je wilt een bericht opnemen zonder de opnametoets constant ingedrukt te houden:** houd de opnametoets ingedrukt en druk kort op de afspeeltoets in het midden. Het apparaat zal nu continu opnemen en zal dit aan geven met een opeenvolgende piepsignaal (laag-hoog) Om dit te stoppen druk dan kort op de opnametoets het apparaat weet dan dat je de opname wilt stoppen en zal dit laten horen met een tegenovergestelde piepsignaal (hoog-laag).

**Je wilt de batterij status nakijken:** druk twee keer snel op de X toets. U zult dan direct tussen een en vier piepsignalen horen met gelijktijdig het knipperen van rode signaal lamp. 1 piepsignaal geeft aan dat de batterij nog vol is, 4 piepsignalen geeft aan dat de batterij leeg is. Wij raden u aan om bij 3 piepsignalen de batterij op te laden.



## 5. TECHNISCHE DATA

Opname capaciteit:	150 minuten
Frequentie:	150HZ tot 8kHz
Jackplug hoofdtelefoon:	standaard 3.5 mm
Afmetingen:	85 x 54 x 14 mm
Gewicht:	45 gram
Maximale oplaadtijd:	3 uur
- Behuizing is gemaakt van stootvast polymeer	
- Ingebouwde oplaadbare lithiumpolymeer batterij	

## 6. ZORG EN ONDERHOUD

Maak het apparaatje met een vochtige, maar niet kletsnatte doek schoon. Gebruik geen schoonmaakmiddel. De oplaadbare batterij mag niet door de gebruiker vervangen worden, maar alleen door de fabrikant.

## GARANTIE

Alle garantie vervalt bij foutief gebruik van het apparaat en bij opening van het apparaat.

Neem contact op met uw slechtziend.nl verkooppunt als u meer over de garantie voorwaarden wilt weten.



## 8. PROBLEEMGEVALLEN

Neem alstublieft contact op met uw slechtziend.nl verkooppunt wanneer u denkt dat de Milestone 310 niet goed werkt.

Behandel eerst de volgende punten, voordat u contact opneemt:

Zijn de druktoetsen geblokkeerd?

Door de X toets en de opnametoets ingedrukt te houden kun je de toetsen blokkeren of vrijgeven.

Is de batterij voldoende opgeladen?

Leg het apparaat aan de adapter voor ongeveer 30 minuten en kijk de functie van het apparaat nog een keer na.

Fout bij het opnemen van een bericht: is er genoeg ruimte over om een bericht op te nemen?

Verwijder een bericht wat je niet meer nodig hebt en probeer opnieuw een bericht op te nemen.

**slechtziend.nl wenste u heel veel plezier en gemak met de milestone 310!**

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit hulpmiddel verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

---

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:  
**slechtziend.nl**