


HANDLEIDING

Sprekend horloge

Nederlandssprekend horloge

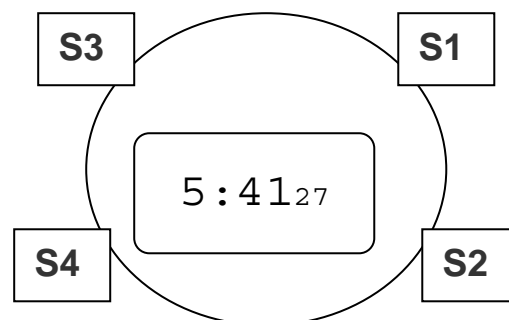

- 1. Druk op S1.**
De tijd wordt uitgesproken.
- 2. Druk op S3 om voor de verschillende uitlezingen te lopen. De volgorde is: Normale tijd; tijd instelstand; alarmtijd instelstand; datum instelstand; jaar instelstand; timerstand; normale tijd.**
- 3. Instellen van de tijd**
Druk op S3 om in de tijd instelstand te komen, druk op S4 om de uren in te stellen. Druk S2 om de minuten in te stellen. Druk op S3 om naar de normale tijd terug te keren.
- 4. Instellen van de alarmtijd.**
Druk op S3 om in de alarmtijd instelstand te komen. Druk op S4 om de alarmuren in te stellen. Druk op S2 om de alarmminuten in te stellen. Druk op S3 om naar de normale tijd terug te keren.

5. Instellen van datum en jaar.

Druk op S3 om in de datum instelstand te komen. Druk op S4 om de maand in te stellen. Druk op S2 om de dag in te stellen. Druk op S3 om in de jaar instelstand te komen. Druk daarna op S2 of S4 om het jaar in te stellen.

6. Timer

Druk op S3 om in de timerstand te komen.

Count down. Druk op S4 of S2 om de countdowntijd in te stellen. Druk op S1 om te starten/stoppen. Druk op S4 of S2 om de timer naar 0:00 te zetten. Count up . Druk op S1 om te starten/stoppen. Druk op S4 of S2 om de timer naar 0:00 te zetten.

7. Alarm aan/uit

Druk op S4 in de normale tijdstand om het alarm aan of uit te zetten.

8. Uursignaal aan/uit

Druk op S2 in de normale tijdstand om het uursignaal aan of uit te zetten (uursignaal symbool verdwijnt/verschijnt) en tevens het gesproken hele uur.

slechtziend.nl wenste u heel veel plezier en gemak met dit sprekend horloge!

Voor overige vragen en/of opmerkingen m.b.t. dit hulpmiddel verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw slechtziend.nl verkooppunt. Hiervoor kunt u gebruik maken van onderstaande adresgegevens.

Uw slechtziend.nl verkooppunt:



Verkooporganisatie en deelnemer aan het concept:
slechtziend.nl