

ReadEasy+

Korte handleiding

Uitklappen vd camera


1)



2)



3)

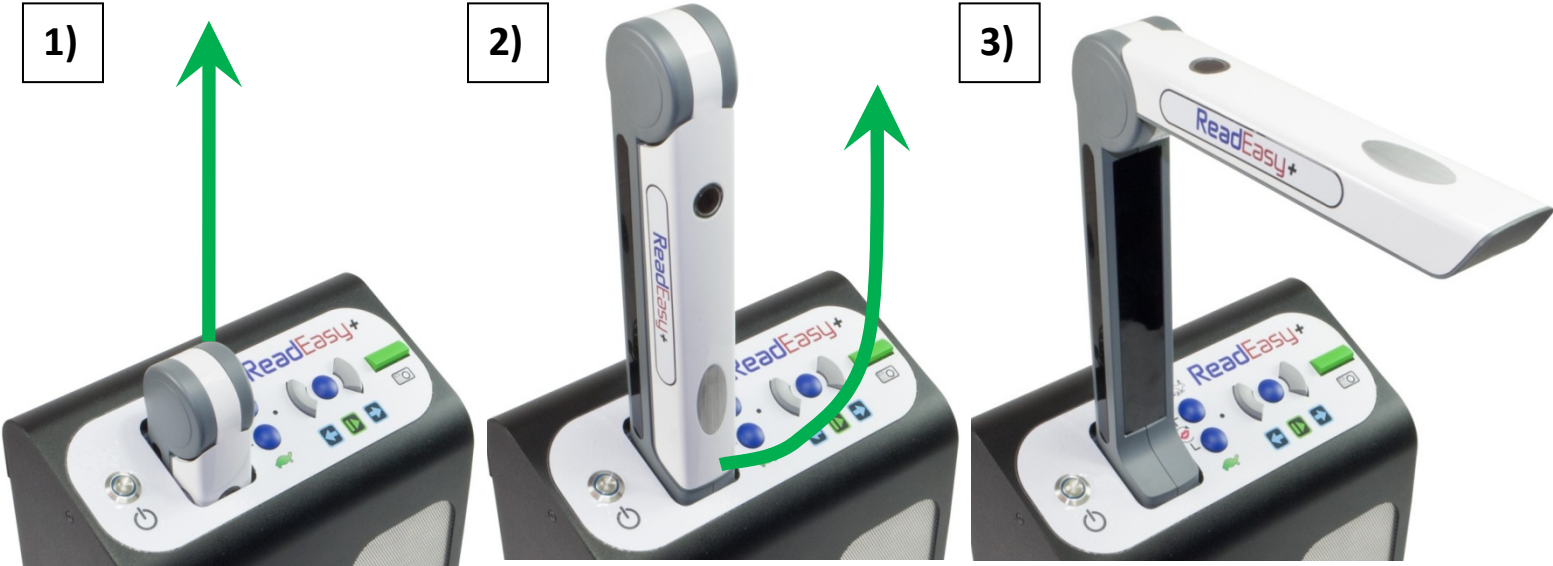

Controls

Aan/uit



Kort indrukken:
Vorige zin
Druk en houdt vast:
Vorige paragraaf



Sneller

Langzamer

Tegerlijkertijd: sneller en langzamer: verander spraak

Kort indrukken:
Volgende zin
Druk en houdt vast:
Volgende paragraaf



Weergave/pauze


Kort indrukken:
vastleggen tekst
Druk en houdt vast:
lezen van een enkele kolom



Volume en hoofdtelefoonaansluiting

Om het volume te regelen, kunt u eenvoudig de schuifregeling gebruiken. Deze is aan de rechterkant, in het midden, geplaatst.

Om de bijgeleverde hoofdtelefoon te gebruiken, druk de stekker in de hoofdtelefoonaansluiting, eveneens aan de rechterzijde geplaatst, onder de volumeschuifregelaar.

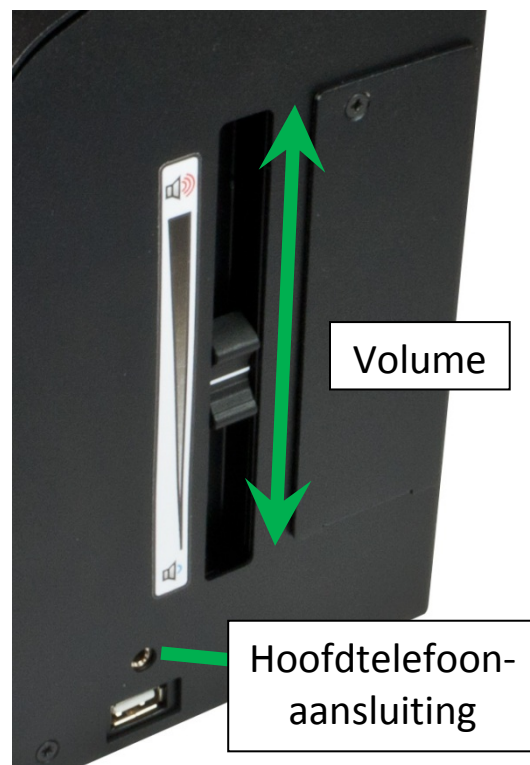

Indien u vragen heeft, kunt u zich melden bij slechtziend.nl of het plaatselijke verkooppunt.

Uw distributeur:

slechtziend.nl

Telefoon: 0487 595654

Verkooppunt: