



Handleiding TV reader uitvoering bedraad

Maak de doos open en haal de componenten uit de verpakking.

- 1 leesmuis
- 1 netvoedingadapter
- 1 draagtasje
- 1 handleiding

We verwijzen naar de afbeeldingen op de Engelstalige handleiding.

1. vergroten
2. Instellingen
3. Beeld vastzetten en weer terug naar de oorspronkelijke positie
4. Verkleinen
5. Aan/Uit
6. Accu laadlampje
7. Videokabel "Y"

Het gebruik van de tv reader.

1. Sluit de netvoedingkabel aan.
2. Steek de stekker in de wandcontactdoos.
3. Sluit de gele plug aan op de gele plug van de televisie. (U kunt meer informatie over deze uitgang van de tv vinden in de handleiding van uw televisie).
4. Zet de televisie aan. Indien noodzakelijk, zet de televisie op het juiste kanaal. Objecten die door de camera worden waargenomen, verschijnen op het televisiescherm.
5. Schakel de TV reader aan door de aan/uit schakelaar op aan te zetten. Het aan/uit lampje licht nu op.
6. Plaats de tv reader bijvoorbeeld op een krant of tijdschrift waarbij de tekst groot op uw eigen televisie verschijnt
7. De bedieningstoetsen: (Zie afbeelding op de Engelstalige handleiding)
 1. M: Mode om de schermkleuren te veranderen. Bijvoorbeeld volledig kleur, zwart op wit en wit op zwart.
 2. + Vergroten
 3. – Verkleinen (druk op andere zijde van deze toets, de tekst wordt nu juist verkleind.
 4. Het beeld vastzetten : druk toets 3 in, het z.g. bevroren van het beeld; om deze handeling weer ongedaan te maken, druk nogmaals deze toets in.

Veiligheidsvoorschriften.

De draadloze tv reader is niet waterproof.

De gebruikstemperatuur van de tv reader ligt tussen min 5 en 50 graden Celsius.

De Led's (lampjes) produceren een helder wit licht en als men hier lang naar kijkt, kan dit schade toebrengen aan de ogen. Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingadapter. Andere adapters kunnen de unit beschadigen. Als de accu vol is, dient de adapter losgekoppeld te worden.

slechtziend.nl wenst u veel leesplezier met de tv reader.