

Handleiding TV reader draadloos



Maak de doos open en haal de spullen uit de verpakking.

- 1 draadloze leesmuis
- 1 ontvanger met kabel
- 1 netvoedingadapter
- 1 draagtasje
- 1 handleiding

We verwijzen naar de afbeeldingen op de Engelstalige handleiding.

1. Vergroten
2. Instellingen
3. Beeld vastzetten en weer terug naar de oorspronkelijke positie
4. Verkleinen
5. Aan/Uit
6. Accu laadlampje
7. Ontvanger functioneert als de basisunit
8. Ontvanger Aan/Uit
9. Ontvanger Aan/Uit lampje
10. Netvoedingconnector
11. Videokabel "Y"

Het gebruik van de tv reader.

1. Sluit de netvoedingkabel aan.
2. Steek de stekker in de wandcontactdoos.
3. Sluit de gele plug aan op de gele plug van de televisie. (U kunt meer informatie over deze uitgang van de tv vinden in de handleiding van uw televisie).
4. Zet de televisie aan. Indien noodzakelijk, zet de televisie op het juiste kanaal. Objecten die door de camera worden waargenomen, verschijnen op het televisiescherm.
5. Schakel de draadloze unit aan door de aan/uit schakelaar op aan te zetten.
6. Plaats de tv reader bijvoorbeeld op een krant of tijdschrift waarbij de tekst groot op uw eigen televisie verschijnt
7. De bedieningstoetsen:
 1. Gebruik toets 2. Zie afbeelding op de Engelstalige handleiding om de schermkleuren te veranderen. Bijvoorbeeld volledig kleur, zwart op wit en wit op zwart.
 - 2-3. Vergroten en verkleinen. Druk toets 1 in aan de voorzijde. Nu wordt de tekst vergroot. Als u op de andere zijde drukt, wordt de tekst juist verkleind.
 4. Het beeld vastzetten: druk toets 3 in.
8. Het opladen van de tv reader.

Als de accu bijna leeg is, dan is de tv reader niet in staat goed te functioneren. Dan dient u de accu opnieuw op te laden.

 1. Schakel de draadloze unit uit door de aan/uit schakelaar op uit te zetten.
 2. Sluit de connector van de netvoeding in de draadloze tv reader.
 3. Stop de stekker in de wandcontactdoos.
 4. Het laadlampje zal nu rood gaan branden, en als de accu volgeladen is, dan gaat het lampje uit.

Veiligheidsvoorschriften.

- De draadloze tv reader is niet waterproof.
- De gebruikstemperatuur van de tv reader ligt tussen min 5 en 50 graden Celsius.
- De LEDs (lampjes) produceren een helder wit licht en als men hier lang naar kijkt, kan dit schade toebrengen aan de ogen.
- Gebruik alleen de meegeleverde netvoedingadapter. Andere adapters kunnen de unit beschadigen.
- Als de accu vol is, dient de adapter losgekoppeld te worden.

slechtziend.nl wenst u veel leesplezier met de tv reader.