

GEBRUIKERSHANDLEIDING BEWEGINGSENSOR MET SPRAAK



Mogelijkheden voor stroomvoorziening

1. De sensor werkt door middel van 3 x AAA batterijen. Deze zijn niet inbegrepen.
2. De sensor kan aangesloten worden door de 5 Volt DC externe adapter aan te sluiten op een micro-usb poort. De adapter en kabel kunnen afzonderlijk aangeschaft worden.

BELANGRIJKE OPMERKING: De twee aansluitmogelijkheden kunnen niet tegelijk gebruikt worden. Verwijder a.u.b. eerst de batterijen alvorens u de adapter benut.

Het opslaan van een geluidsfragment

De Sensor bevat in totaal 4MB (megabyte) aan intern geheugen (ongeveer gelijk aan totaal 4 minuten MP3 geluidsfragmenten). MP3 bestanden kunnen als volgt opgeslagen worden:

- Indien van toepassing: verwijder de batterijen
- Sluit de Sensor aan op een vrije USB poort van een PC of Mac. Gebruik hiervoor de meegeleverde USB kabel.
- De eerste keer dat de Sensor aangesloten wordt op een computer is het gebruikelijk dat de drivers (stuurprogramma's) geïnstalleerd worden. Dit gebeurt volledig automatisch. Mogelijkerwijs dient de PC opnieuw opgestart te worden.
- De PC herkent de Sensor als USB-apparaat en een pictogram verschijnt vervolgens in "Windows Verkenner".

- Kopieer (control + c) en plak (control + v) de geselecteerde geluidsbestanden van uw PC naar de Sensor. Wanneer de overdracht voltooid is, kunt u dit bestand terugvinden in desbetreffende map.
- De Sensor is nu klaar voor gebruik. U kunt de meegeleverde USB-kabel loskoppelen.

BELANGRIJKE OPMERKING: De Sensor speelt enkel bestanden in MP3 formaat af met een bestandsgrootte van maximal 4MB.

Sensor in gebruik nemen


Voor een gedetailleerde weergave van alle knoppen kunt u naast onderstaande gebruiksaanwijzingen tevens Figuur A raadplegen.

Zet de hoofdschakelaar aan (Zie figuur A). Deze bevat 3 standen. Staat de schakelaar onderin dan is het apparaat uitgeschakeld. Bij de middelste en bovenste standen wordt de Sensor ingeschakeld met respectievelijk een: **laag** en een **hoog** geluidsvolume. Het kan ongeveer 20 seconden duren voordat de Sensor volledig ingeschakeld is.

De Sensor detecteert beweging middels Infrarood en tot een afstand van maximaal 4 meter. Iedere keer wanneer iemand voorbij loopt zal een/het geluidsfragment afgespeeld worden. Er zijn twee verschillende geluidsinstellingen mogelijk. Door op knop **A** te drukken kunt u bladeren tussen de verschillende geluidsmodussen.

- 1. Herhaling van eenzelfde geluidsfragment.** Door meerdere malen op een willekeurige knop te drukken te drukken hoort u de verschillende geluidsfragmenten. Houd knop **A** gedurende 3 à 4 seconden ingedrukt wanneer het gewenste geluid afgespeeld wordt. Het rode LED lampje zal enkele malen beginnen te knipperen.
- 2. Afspelen van verschillende geluidsfragmenten.** Bij deze optie wordt iedere keer een ander (onwillekeurig) bestand afgespeeld. De bestanden worden afgespeeld in de volgorde waarin deze op het apparaat zijn geladen. De Sensor kan bestanden **niet** aselekt afspelen. Houd knop **A** gedurende 3 à 4 seconden ingedrukt wanneer het gewenste geluid afgespeeld wordt. Het rode LED lampje zal enkele malen beginnen te knipperen.

Figuur A

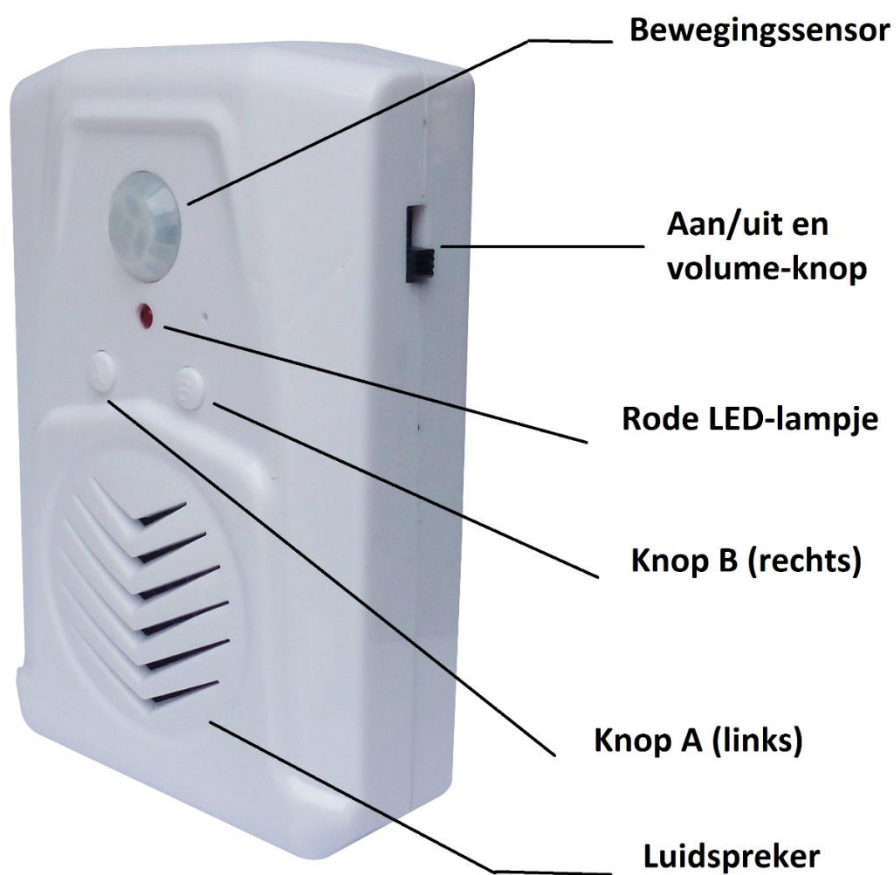

Figuur B (achterzijde)

